

ginedie[®] capsule vaginali

Dispositivo medico di Classe I

8 capsule vaginali da 615 mg, 1 applicatore vaginale

Ingredienti: vitamina A acetato, vitamina E (tocoferile acetato), colostro bovino, sodio ialuronato, lactobacillus acidophilus, frutto-oligosaccaridi, idrossipropilmetilcellulosa, acido poliacrilico, cellulosa microcristalina, talco, ottenilsuccinato di amido e sodio, gomma di acacia senegal, saccarosio, E171.

Indicazioni d'uso: capsule per uso ginecologico. Trattamento utile per il mantenimento delle fisiologiche condizioni della mucosa cervico-vaginale anche in caso di alterazioni da HPV. Coadiuvante nel trattamento delle ectopie, prevenzione di vaginiti aspecifiche e vaginosi batteriche, nel mantenimento dell'omeostasi vaginale e durante la menopausa per prevenire la perdita del trofismo della mucosa vaginale.

Modalità d'utilizzo: 1 capsula vaginale 3 volte la settimana a giorni alterni (es. lun-merc-ven oppure mart-gio-sab) prima di coricarsi per cicli da 2 a 6 mesi o secondo giudizio medico. Si consiglia la sospensione durante il periodo mestruale. Si consiglia di utilizzare il prodotto per cicli ripetuti. La capsula va introdotta delicatamente in profondità in vagina, in caso di difficoltà, utilizzare l'apposito applicatore presente nella confezione. In caso di secchezza vaginale, si consiglia di inumidire la capsula con acqua prima di inserirla. Dopo l'uso ripulire accuratamente la cannula. L'uso della cannula è strettamente personale.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Il prodotto è esclusivamente per uso topico. Non ingerire. Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti. In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico. Non eccedere le dosi raccomandate per l'utilizzo giornaliero. Qualora i disturbi dovessero persistere oltre la seconda settimana di terapia, si consiglia di consultare il medico. Il prodotto è destinato all'uso da parte di adulti. Per l'utilizzo in fasce di età diverse consultare il medico. Non utilizzare il prodotto in gravidanza.

Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

 Dispositivo medico
Medical device

Fabbricante: **Enteralia Bioscience srl** Via De Amicis 26, 20123 - Milano (MI)


enteralia